

Avec une pochette CARTOUCHE i-STAT à θ° ambiante, ou bien retirée du frigo depuis **au moins 5 minutes**.

1) **Remplissage** de la CARTOUCHE **CREA** ou **PT/INR** ou **G3+**.

Prendre délicatement entre le pouce et l'index une CARTOUCHE neuve et à θ° ambiante pour y déposer 1 goutte de Sang homogénéisé pour la **CREA**, et 2 gouttes pour la **G3+**, et 1 goutte de sang NATIF, sang frais, pour la **PT/INR**.

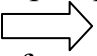
A l'aide d'une seringue, d'un capillaire ou d'une pipette labo, déposer, sans injecter, le prélèvement de sang requis pour remplir justement et sans trop, le puits de la cartouche jusqu'au **TRIANGLE BLEU**.

Une fois le Sang dans la CARTOUCHE, fermer le capuchon du puits en venant délicatement le cliquer sur le bord extérieur droit de la cartouche avec le pouce.

2) **Allumer** l'analyseur i-STAT 1.

Choisir la touche 2 puis suivre attentivement les consignes sur l'écran de l'analyseur.

ID Opérateur : Entrer votre Code Opérateur à 6 chiffres, par ex. JJMMAA.
ID Patient : Scanner l'identifiant code-barres du dossier patient, code NIP.
ID Cartouche Scanner le code-barres de la pochette cartouche.

Quand l'écran indique que l'analyse a commencé, il est possible d'aller à la Page avec la touche :  pour ajouter des informations complémentaires.

3) **Après le Bip de fin** d'analyse, 2 Minutes pour la **CREA** et la **G3+**.

Les résultats à l'écran peuvent être imprimés sur l'imprimante externe : Placer l'analyseur en face de l'imprimante allumée, les 2 ports Infrarouge en vis-à-vis, et appuyer sur la touche PRINT de l'analyseur.

Suivre les consignes à l'écran AVANT de retirer la cartouche usagée.

NE PAS RETIRER LA CARTOUCHE SANS LA DEMANDE DE L'ANALYSEUR. Choisissez la Touche 1 pour « option test ».

Déposer l'analyseur sur sa Borne Infrarouge et Chargeur.

