



1 OBJET

Ce document décrit la procédure dégradée de dosage des gaz du sang délocalisés en cas de panne de l'analyseur des Gaz du Sang ABL 835 (Radiometer) délocalisé à l'**Unité Pédiatrique en Maternité**, 2ème étage du bâtiment Olympe de Gougues, Hôpital Bretonneau.

2 MÉTHODOLOGIE

3.1 Manque de réactifs, vidange pleine

Les personnels de l'Unité Pédiatrique en Maternité habilités aux GDS sont formés au changement des flacons de réactifs (Rinçage, Nettoyage, Cal 1 et Cal 2), ainsi qu'au remplacement de la poubelle et du papier.

En cas de nécessité, ils savent consulter le « Formateur » sur l'appareil.

3.2 Pannes ou problèmes de dosage de certains paramètres

□ En semaine et dans la journée (jusqu'à 19h) :

- 1) Le dosage des GDS urgents est effectué à la **Maternité** (1er étage du bâtiment Olympe de Gougues).
- 2) Le personnel de l'Unité Pédiatrique en Maternité prévient la **Biochimie Bretonneau** (☎ **74303/72371 avant 16h**, puis **74377**), qui peut intervenir à distance.
- 3) Si le problème persiste malgré tout :
 - avant 16h : un(e) technicien(e) se déplace dès que possible pour dépanner l'appareil ;
 - de 16h à 19h : le biologiste de validation de Biochimie Bretonneau intervient.

□ La nuit et le week-end, la garde de Biochimie étant assurée à Trousseau :

- Le dosage des GDS de l'Unité Pédiatrique en Maternité est effectué à la **Maternité** (1er étage du bâtiment Olympe de Gougues).
- Le personnel de l'Unité Pédiatrique en Maternité prévient la **Biochimie Trousseau** (☎ **75689**), qui peut intervenir à distance.
- Exceptionnellement, en cas de problème sur les 2 appareils (UPM et Maternité), le biologiste d'astreinte en Biochimie à Trousseau pourra être amené à se déplacer dans les services.

3 TRAÇABILITÉ ET CONSERVATION

Preuves de réalisation	Responsable	Durée d'archivage	Lieux de conservation
Enregistrements des activités sur l'analyseur GDS. Fiches de vie de l'analyseur Rapports d'interventions (SAV) (classeur vert Maintenance GDS). Documents de la conformité, vérification, qualification de l'automate.	Technicien référent GDS, sous la responsabilité du biologiste référent du secteur Biologie délocalisée.	Durée de vie de l'analyseur des GDS + 18 mois.	Fichier Activités (analyseur des GDS, logiciel Radiance). Pièce d'archive 01LB40.