



## Etape 1

Laver et sécher la main du patient  
Préparer une lancette en position 3

## Etape 2

Allumer l'analyseur  
Appuyer sur la touche Test Patient  
Identifier le patient : Nom, Prénom  
Identifier l'utilisateur : N° matricule

## Etape 3

Introduire une bandelette et pousser jusqu'à la butée

Reboucher immédiatement le flacon

Piquer la pulpe du doigt sur le coté en positionnant la lancette en position 3 (profondeur 2.3)

Faire glisser la goutte de sang sur la zone de dépôt par capillarité.

Lorsque le résultat s'affiche, retirer la bandelette

**INR délocalisés  
recommandations**



## Etape 7

Transmettre le bon d'examen au service d'hématologie  
Trousseau pour saisie des résultats dans le DPP

## Etape 6

Repositionner le coaguchek XS pro sur son socle

Profondeur de 2.3 mm

Usage pour peau épaisse ou si le volume de sang nécessaire est important.



## Etape 5

Identifier un bon d'examen (coller l'étiquette du patient)

Nom du prescripteur

Nom de l'utilisateur

Imprimer un ticket résultat et le coller sur le bon d'examen

## Etape 4

Connecter le Coaguchek avec l'imprimante  
Imprimer le résultat du patient

