


Guide simplifié de passage d'une NFS sur l'Horiba

Le matin :


1. Vérifier le niveau des réactifs et du bac de déchet, attention aucune alarme en cas de niveaux bas et pas de détection du trop plein du bac de déchet

2. Passer les 3 niveaux de contrôle (voir guide simplifié)

NB : le cycle de démarrage est effectué la nuit automatiquement

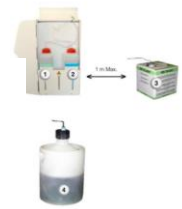


- 1 = ABX Miniclean
- 2 = ABX Minilyse LMG
- 3 = ABX Minidil LMG
- 4 = Conteneur de déchets

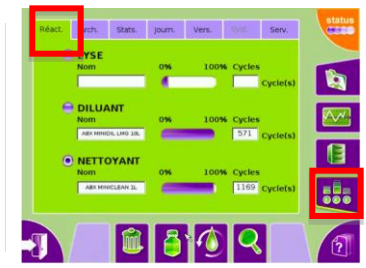



Passage d'un échantillon

Etape 1 : identification échantillon

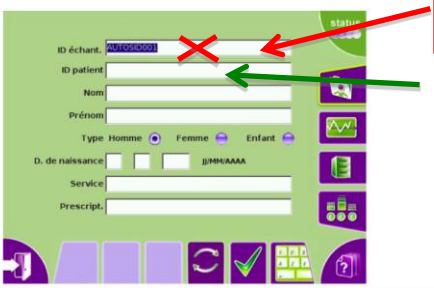

Ne pas utiliser cette ligne pour identifier votre tube

Mettre le curseur sur cette ligne et passer le code barre du tube avec la douchette

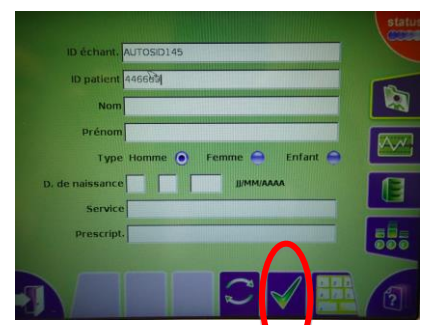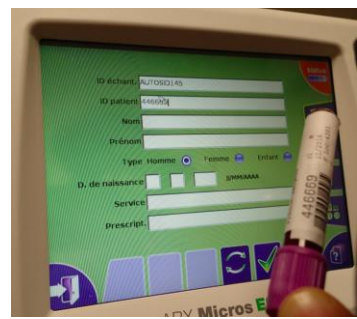

Valider


Etape 2 : La boîte de dialogue s'affiche et la porte s'ouvre



Bien agiter le tube et le placer dans le portoir. Le tube doit toujours se situer en haut du cercle



Fermer la porte

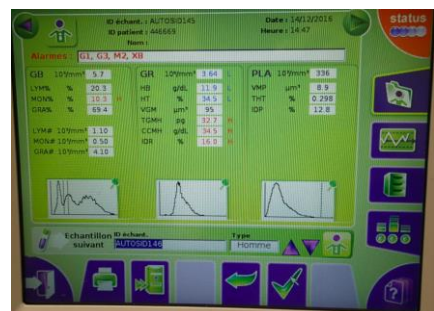

Les résultats du patients s'affichent et s'impriment sur le papier déroulant



Etape 3 : transmettez les résultats

Prendre le ticket résultat et l'agrafer au bon de demande. Rapporter le bon de demande dans le service avec le résultat patient

Etape 4 : Passer un nouvel échantillon



Cliquer sur cette icône pour retrouver l'écran de l'étape 1

