



1 OBJET

Ce document décrit la procédure dégradée de dosage des gaz du sang délocalisés en cas de panne de l'analyseur ABL90 (Radiometer) de **Réanimation Néonatale** (1er étage Bâtiment B4 du CHRU de Bretonneau).

2 MÉTHODOLOGIE

3.1 Manque de réactifs

Le personnel de Réanimation Néonatale habilité au dosage des GDS est formé au changement de papier. Le personnel Référent Gaz du sang de Réanimation Néonatale est formé au changement de pack de solutions ainsi qu'au changement de cassette « Sensor ».

3.2 Pannes ou problèmes de dosage de certains paramètres

□ En semaine et dans la journée (jusqu'à 19h00) :

- 1) Le dosage des GDS urgents est effectué en Salle de naissance de la maternité (Bâtiment Olympe de Gouge, CHRU Bretonneau).
- 2) Le personnel de Réanimation Néonatale prévient la **Biochimie Bretonneau** (☎72731 avant 16h, puis le **72414 de 16h à 19h**), qui peut intervenir à distance.
- 3) Si le problème persiste malgré tout :
 - avant 16h : un(e) technicien(e) se déplace dès que possible pour dépanner l'appareil ;
 - de 16h à 19h : le biologiste de validation de Biochimie Bretonneau intervient.

□ La nuit et le week-end, la garde de Biochimie étant assurée à Trousseau :

- Le dosage des GDS de Réanimation Néonatale est effectué en Salle de naissance de la maternité (Bâtiment Olympe de Gouge, CHRU Bretonneau).
- Le personnel de Réanimation Néonatale prévient la **Biochimie Trousseau** (☎ 74684), qui peut intervenir à distance.
- En cas de problème sur les 2 appareils (Réanimation Néonatale et en Salle de naissance de la maternité (Bâtiment Olympe de Gouge, CHRU Bretonneau) les gaz du sang peuvent être dosés sur les automates de la réanimation médicale (2 ième étage du B1A du CHRU de Bretonneau).
- le biologiste d'astreinte en Biochimie à Trousseau pourra être amené à se déplacer dans les services.

3 TRAÇABILITÉ ET CONSERVATION

Preuves de réalisation	Responsable	Lieux de conservation
Enregistrements des activités sur l'analyseur GDS. Fiches de vie de l'analyseur Rapports d'interventions (SAV) (classeur vert Maintenance GDS). Documents de la conformité, vérification, qualification de l'automate.	Technicien référent GDS, sous la responsabilité du biologiste référent du secteur Biologie délocalisée.	Fichier Activités (analyseur des GDS, logiciel Aqure). Pièce d'archive 01LB40.